



Supracors 3-zons Stimulite® bäddmadrass

Optimal tryckavlastning för akut och långsiktig vård



Stimulite 3-zons bäddmadrass

är tillverkad i termoplastisk polyuretan som består av perforerade celler i bikakestruktur.

Alla celler är sammanfogade, samt är formbara efter kroppens kurvatur. Detta ger en optimal stabilitet, tryckfördelning och tryckavlastning för ömma och utskjutande delar. Vid läkning och förebyggande av trycksår är det viktigt att huden inte är varm och fuktig. I Stimulite 3-zons bäddmadrass tillåts luften att cirkulera genom miljontals hål i de perforerade cellerna. Bäddmadrassen består av tre olika zoner utan skarvar i övergångarna. Huvud och fotända är ca 40 % mjukare än det bärande mittpartiet, skonsamt för ömma hälar.

Bäddmadrassen är praktisk för hemmabruk. Lätt att lyfta samt behöver ingen strömförsörjning, vilket ger frihet att ha sängen där man önskar. Eftersom den inte har någon motor blir den helt tyst att ligga på. Den behöver heller ingen kontinuerlig service eller speciella skötselinstruktioner, exempelvis volymkontroll. Den är lätt att sköta och hålla ren då den tål maskintvätt och torktumling. Bäddmadrassen är tillverkad av miljövänlig termoplastisk polyuretan som är behandlad för att vara antibakteriell, och är i stort sett kvalsterfri. Detta gör bäddmadrassen särskilt lämpad för allergiska personer. För MRSA-kontroll eller annan desinfektion kan Virkonmedel enligt bruksanvisning användas.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95 - Fax: 031-52 18 92


email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.se




Jämförande redovisning av tryckmätning

Stimulite fördelar och utjämnar vikt över en bredare yta än konventionella madrassmaterial. Med hjälp av FSA System för redovisning av tryckmätning, aktiveras 323 sensorer på en Stimulite madrass jämfört med 305 sensorer på en konventionell madrass. Testresultaten visar också väsentligt lägre tryck på Stimulite-madrassen.

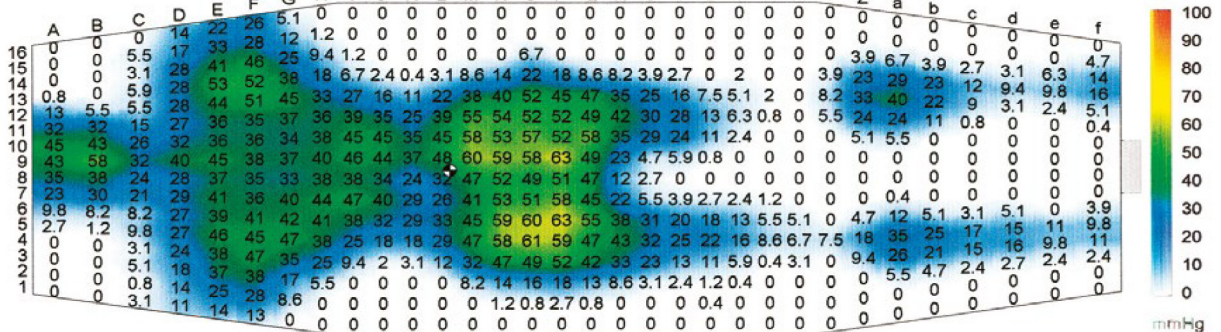

Man vikt ca 100 kg (225 lbs) på en Stimulite madrass.

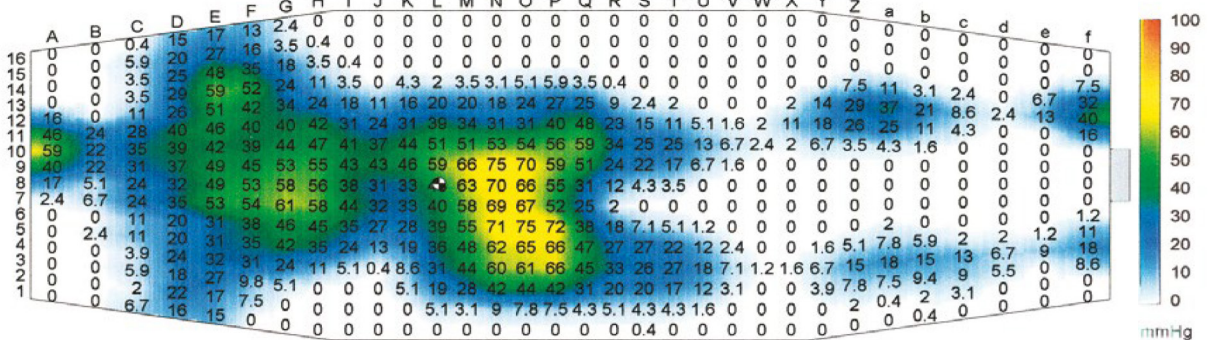

Man vikt ca 100 kg (225 lbs) på en standard fjädermadrass.

Artikel	Artikel nummer	Storlek	Kan även beställas som paket (inkl. väska)
Bäddmadrass	GSR00056	= 82,5x200x7 cm, 33x80x2,5"	3ZON82 = madrass & överdrag
	GSR00067	= 85x200x7 cm, 34x80x2,5"	3ZON85 = madrass & överdrag
	SRC00024	= 90x200x7 cm, 36x80x2,5"	3ZON90 = madrass & överdrag
Inkontinensöverdrag	COVIN3380	passar madrass med 82,5 bredd	
	COVIN3480	passar madrass med 85 bredd	
	COVIN3680	passar madrass med 90 bredd	
Fuktuppsamlare	INMATT3227	80x200 cm (passar alla tre madrasstorlekarna)	
Mjukt bomullsöverdrag	COVST4080	(passar alla tre madrasstorlekarna)	
Väska	BAG	(passar alla tre madrasstorlekarna)	
Tvättpåse för madrasskärna	LDBAGBED	(passar alla tre madrasstorlekarna)	

Tekniska data
Vikt: 6kg
Höjd: 7cm
Bredd: 82,5; 85; 90 cm
Längd: 200 cm
Brukarvikt: 25-160 kg



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga Stimulite madrasser är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 och SS-EN 597:2015 samt CE-märkta.



GÖRAN SJODÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95 - Fax: 031-52 18 92
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se