

# StimuLITE®

## CONTOURED SITTDYNA



### UTMÄRKT STABILITET OCH TRYCKAVLASTNING MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE® Contoured sittdyna är gjord för dem som är i behov av en bra sittställning och optimal tryckutjämning. Dynan är uppbyggd av 100% termoplastisk polyuretan (TPU) i bikubestruktur i olika hårda och mjuka lager som anpassar sig efter kroppens behov. Alla StimuLITE dynor är uppbyggda av perforerade sexkantceller i bikakestrukturer sk. honeycomb, vilka tillåter luft att cirkulera, sänker temperaturen och låter fukt avdunsta. Sittgropen är formad för att ge bäcken en bra positionering, bra stabilitet och hållning. Sittgropen är också försedd med ett mjukare skikt som bäddar in sittbenknölna och svanskota, samt ser till att man inte sitter igenom. Det mjukare skiktet övergår gradvis till ett fastare skikt som fördelar trycket från sittbenknölna och trochanterna till undersidan av låren. Bendelaren och lårstöden håller benen på plats. Tack vare följsamheten i bikakestrukturen och bra design motverkar StimuLITE Contoured sittdyna decubitus, genom optimal tryckutjämning. Tryck, skjuvning och friktion samt fukt (fuktig hud är skör) är de främsta orsakerna till decubitus.



Ett luftgenomsläppligt överdrag med ventilationsnät på sidorna kompletterar StimuLITE ventilationssystem och håller användaren torr och sval. Genom att kontrollera temperatur och fuktighet motverkar StimuLITE sittdynor hudskörhet.

StimuLITE Contoured sittdyna är idealisk för paraplegiker, tetraplegiker och andra personer som kräver bra positionering och är i hög risk att få trycksår. Vikten på dynan är ca 1,5 kg, och den är lätt att använda och kräver ingen extra skötsel. Fodralet är utrustat med en fast ficka som kan placeras under dynan. Dynan och överdraget är maskintvätt- och torktumlingsbara 40-60°.

**Vid utrangering, återvinn plasten, genom plaståtervinning.**

**StimuLite Contoured rullstolsdyna har 2 års garanti.**



## Total Pressure Management™

### Förebygger Hudskörhet

Fuktighet mjukar upp huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska.


Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE



Contoured sittdyna

erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb) och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.

Andas och avdunstar fukt.

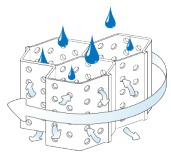


### Komplett ventilationssystem

### Tryckavlastning

StimuLITEs cellkonstruktion i bikakestruktur (honeycomb) ger optimal tryckavlastning. StimuLITE sittdynor avleder tryck genom att distribuera tryck från känsliga områden. Detta resulterar i att utstående sittben känner samma tryck som närliggande kroppsdelar. StimuLITE Contoured fördelar tryck från sittbenknölar och trochanter till mjukdelar under låren.


Ett mjukare skikt bäddar in sittbenknölar och svanskota och förebygger att brukaren sitter igenom.

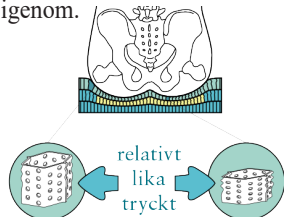

litet belastning      relativt lika tryck      hög belastning  
Fördelar tryck efter kroppsform

### Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE Contoured dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

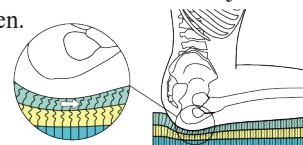

minimal skjuvkraft mot vävnader

### Diffus lateral skjuvkraft

### StimuLITE Contoured Sittdyna

StimuLITE Contoured sittdyna rekommenderas till paraplegiker, tetraplegiker och andra personer som är i hög risk att få trycksår och behöver bra positionering. En sittgrop med ett tryckutjämnande område för att omsluta sittbenknölar och svanskota och undvika risken att sitta igenom. Den mjukare överdelen övergår till en fastare underdel för ökad stabilitet. Lårstöd och bendelare för bra benpositionering utan att försvara förflyttningar i sidled. Perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb), tillåter luftcirkulation genom dynan samt avleder fukt. Det unika ventilationssystemet minskar hud-skörhet och möjliggör optimala förutsättningar att motverka uppkomsten av trycksår.

- \* Låg vikt - ca. 1,5 kg
- \* Mycket stabil
- \* Unikt ventilationssystem
- \* Tvättbar i maskin 40-60°, torktumlas i låg värme
- \* Erbjuder optimal tryckutjämnning
- \* Finns med rundad botten (för hängmattesits)
- \* Max brukarvikt 130 kg
- \* Finns med smal och bredare (+3cm) sittgrop

#### StimuLITE Contoured Sittdynor

Storlek (sittbredd x sittdjup) x 8cm  
Rundad botten +S (CD1414S)  
Bredare sittgrop +BB (CDBB1414)

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
CD1414	36x36cm	CD1716	43x41cm
CD1416	36x41cm	CD1717	43x43cm
CD1418	36x46cm	CD1718	43x46cm
CD1420	36x51cm	CD1720	43x51cm
CD1516	38x41cm	CD1816	46x41cm
CD1517	38x43cm	CD1817	46x43cm
CD1518	38x46cm	CD1818	46x46cm
CD1520	38x51cm	CD1820	46x51cm
CD1616	41x41cm	CD2016	51x41cm
CD1617	41x43cm	CD2018	51x46cm
CD1618	41x46cm	CD2020	51x51cm
CD1620	41x51cm		

Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för hängmattesits mer än 2,5 cm.

Max storlekar:  
CD2220 plan botten (56x51cm)  
CD2020S rund botten (51x51cm)

Överdrag:  
Cordura: COVCD + storlek  
Ullfrotté: WCOVCD + storlek  
Glidöverdrag: COVOUTCD + storlek


Tillbehör:  
Inkontinensinlägg (IN + storlek)  
positioneringskil (KIL)

#### StimuLITE Inkontinensinlägg

Storlek (sittbredd x sittdjup)

Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

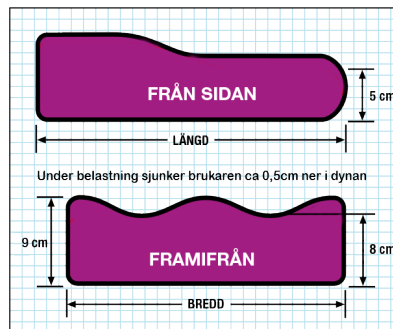

Önskar du en mjukare dyna? StimuLITE Contoured finns med mjukare toppskikt och heter då Contoured Extra Mjuk (Art. nr. CDXS)



Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



SVENSK MILJÖBAS



GÖRAN SJODÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: 031-52 18 95  
Fax: 031-52 18 92

email: goran@rehabshop.com  
www.rehabshop.se