

StimuLITE®

CONTOURED EXTRA SENSITIVE SITTDYNA



TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

UTMÄRKT STABILITET OCH TRYCKAVLASTNING MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE® Contoured XS sittdyna har ett mjukt toppskikt av följsam Honeycomb i bikakestruktur för personer med extra känslig hud.

Ger total tryckavlastning – tryckfördelning, reducerad skjuvning och friktion. Ventilationen avleder värme och fukt samt förebygger och lindrar trycksår.

Dynan är gjord av högklassigt, medicinskt godkänt termoplastisk polyuretan TPU som är antibakteriellt, förhindrar bakteriesvamp och förblir luktfri efter rengöring. Materialet mår bra av regelbunden tvätt. Dynan och överdraget kan tvättas i maskin eller spolas av med dusch. En ren och hygienisk sittdyna underlättar att hålla huden ren och frisk.

StimuLITE Honeycomb fördelar vikt och tryck samtidigt som den ger utmärkt stabilitet. Honeycomb-cellerna formar sig efter kroppen och är följsamma vid rörelse, för att mildra stötar och skador på vävnader. Cellerna är perforerade så att luft cirkulerar och avleder fukt.

StimuLITE Contoured XS sittdyna är speciellt framtagen för paraplegiker, tetraplegiker och övriga personer som behöver sittdynor med extra krav på



positionering, tryckutjämning och komfort.

Dynan är tillverkad av flexibla, sammansvetsade celler med olika hårdhet. Baktill på dynan finns en sittgrop som ger optimal bäckenpositionering för att förbättra hållning och stabilitet. Sittgropen består av en mjukare del för svanskota och sittbenknölar. Bendelare och lårkilar är inbyggda för bättre komfort utan att försvåra vid sidoflyttningar. Överdraget är luftgenomsläppligt och har framtill en tillhörande ficka för förvaring av plånbok, nycklar etc.

StimuLITE Contoured Extra Sensitive sittdynor finns med två olika sittgropsstorlekar. Den större sittgropen +3 cm beställes genom tillägget BB.

Dynan är mjuk och behaglig för de flesta användare. Har man behov av mer stabilitet välj StimuLITE Contoured dynan med en fastare toppskikt.

Vid utrangering, återvinn plasten, genom plaståtervinning. StimuLITE CDXS rullstolsdyna har 2 års garanti.




Total Pressure Management™

Förebygger Hudskörhet

Fuktighet "mjukar upp" huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska. Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE Contoured XS sittdyna erbjuder, med dess perforerade celler i bikakestruktur och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

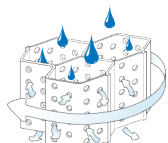

Komplett ventilationssystem

StimuLITE Contoured XS Sittdyna


StimuLITE Contoured XS sittdyna rekommenderas till paraplegiker, tetraplegiker och andra personer som är i hög risk att få trycksår och behöver bra positionering. En sittgrop med ett tryckutjämnande område för att omsluta sittbenknölar och svanskota och undvika att "sitta igenom".

Den mjukare överdelen övergår till en fastare underdel för ökad stabilitet. Lärstöd och bendelare för bra benpositionering utan att försvåra förflyttningar i sidled. Perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb), tillåter luftcirkulation genom dynan samt avleder fuktighet. Det unika ventilationssystemet minskar hud-skörhet och möjliggör optimala förutsättningar att motverka uppkomsten av trycksår.

- * Låg vikt - ca. 1,5 kg
- * Mycket stabil
- * Unikt ventilationssystem
- * Tvättbar i maskin 40-60°, torktumlas i låg värme
- * Erbjuder optimal tryckutjämnning
- * Finns med rundad botten (för hängmattesits)
- * Max brukarvikt 130 kg
- * Finns med smal och bredare (+3cm) sittgrop

Tryckavlastning


StimuLITEs cellkonstruktion i bikakestruktur ger optimal tryckavlastning. StimuLITE sittdynor avleder tryck genom att distribuera tryck från känsliga områden. Detta resulterar i att utstående sittben känner samma tryck som närliggande kroppsdelar. StimuLITE Contoured XS fördelar tryck från sittbenknölar och trochanter till mjukdelar under låren. Ett mjukare skikt bäddar in sittbenknölar och svanskota och förebygger att "sitta igenom".

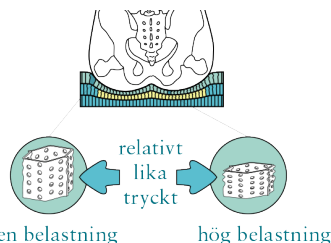

Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE Contoured XS dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

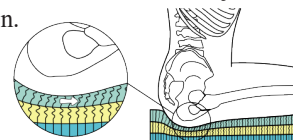

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Contoured XS Sittdynor			
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 8cm			
Rundad botten +S (CDXS1414S)			
Bredare sittgrop +BB (CDBBXS1414)			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
CDXS1414	36x36cm	CDXS1716	43x41cm
CDXS1416	36x41cm	CDXS1717	43x43cm
CDXS1418	36x46cm	CDXS1718	43x46cm
CDXS1420	36x51cm	CDXS1720	43x51cm
CDXS1516	38x41cm	CDXS1816	46x41cm
CDXS1517	38x43cm	CDXS1817	46x43cm
CDXS1518	38x46cm	CDXS1818	46x46cm
CDXS1520	38x51cm	CDXS1820	46x51cm
CDXS1616	41x41cm	CDXS2016	51x41cm
CDXS1617	41x43cm	CDXS2018	51x46cm
CDXS1618	41x46cm	CDXS2020	51x51cm
CDXS1620	41x51cm		

Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för rullstolar med hängmattesits mer än 2,5 cm.


Max storlekar:
 CDXS2220 plan botten (56x51cm)
 CDXS2020S rund botten (51x51cm)

Överdrag:
 Cordura: COVCD + storlek
 Ullfrotté: WCOVCD + storlek
 Glidöverdrag: COVOUTCD + storlek

Tillbehör:
 Inkontinensinlägg (IN + storlek)
 positioneringskil (KIL)

StimuLITE Inkontinensinlägg	
Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

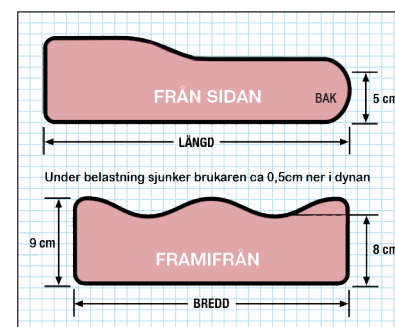

Önskar du en fastare dyna? StimuLITE Contoured XS finns med fastare toppskikt och heter då Contoured (Art. nr. CD)



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



Göran Sjödén's
REHABSHOP
 DISTRIBUTION
 GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
 Bultgatan 17
 442 40 KUNGÄLV
 Tel: 031-52 18 95
 Fax: 031-52 18 92
 email: goran@rehabshop.com
 www.rehabshop.se