



StimuLITE®

HEELBOOT

*extra mjukt häl- och malleolskydd
för personer med smärtproblem
eller risk för trycksår*



Det vanligaste trycksåret i samband med sängliggande förekommer runt hälen. Stimulite® Heelboot är avsedd för personer med ökad risk för att utveckla trycksår runt hälen och fotleden samt vid ökad smärtproblematik i detta område. Den är lätt och bekväm att bära, och passar både i sängen samt uppesittande. Det unika häl och fotavlastningsmaterialet med Stimulite honeycomb är bara 3 cm tjockt och tryckavlastar på ett mycket effektivt sätt regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och området kring bastålederna.

Trycksår orsakas fram för allt av tre saker tryck, fukt och skjuvning. Stimulite Heelboot reducerar tryck genom ett honeycomb materialet med rörliga sexkantceller avlastar och fördelar tryck. En torr hud är en stark hud. Stimulite® cellerna består till 93 % av luftvolym som håller foten torr och sval, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid långvarigt liggande.

Stimulite Heelboot minskar skjuvning då cellerna rör sig när foten rör sig, samt att passformen är följsam längs foten. Detta är viktigt när man rör sig i sängen, men också när man har okontrollerade rörelser samt vid sittande i rullstol. Heelbooten kan användas dygnet runt och det går bra att ta några steg vid behov, då den är utrustad med antiglid material under foten.



Den är lätt att hålla ren. Maskintvättas hela produkten i 40° eller 60° (i kortprogram 30 min). Torktumla den torr i låg värme. Kan desinficeras med Virkon®. Produkten kommer färdig att användas. Det finns inga lösa delar eller inställningar.



Tekniska data:

Tyg: Slitstark Cordura®, anti-glid material i polyuretan.


Tryckavlastningspaneler: 100% Termoplastisk Polyuretan (TPU); inga tillsatser

Vikt: 0,3-0,5 kg

Färg: Svart

Användning:

Produkten finns i tre storlekar, men Du kan ha samma produkt på höger eller vänster fot. Öppna kardborren och sätt i foten. Justera kardborren till önskad passform. Produkten fungerar bäst direkt mot huden. Produkten skall kännas behaglig att använda och inte orsaka obehag

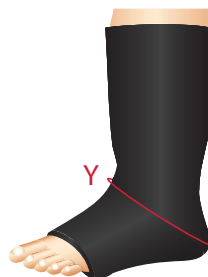

StimuLITE Heelboot Storlekar			
	Small	Medium	Large
Artikelnummer	HEEL-S	HEEL-M	HEEL-L
Y - omfång	< 32 cm	32-42 cm	> 36 cm
Passar skostorlek	35-42	37-45	40-50
Höjd	28 cm	30 cm	33 cm