




StimuLITE®

CORBEE® SITTDYNA FÖR BARN

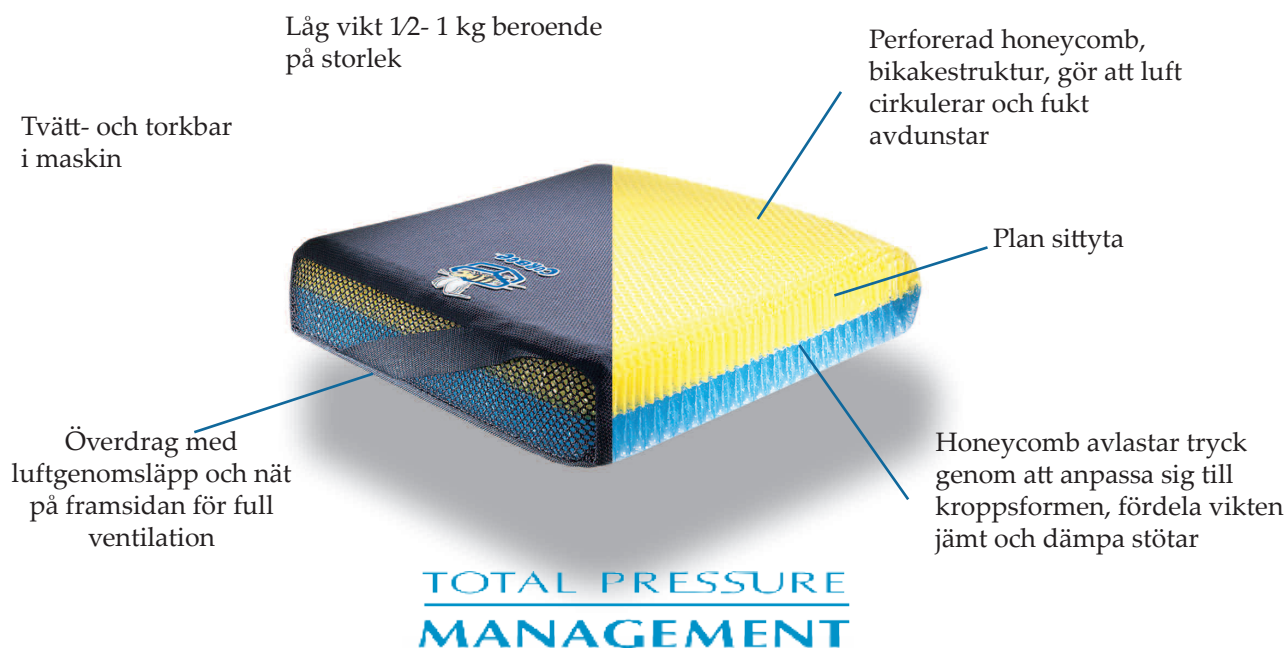


MASKINTVÄTTBAR HONEYCOMB

Barndyna Corbee® är en sval, torr, bekväm sittdyna som kan tvättas i maskin en dyna som både föräldrar och barn gillar.

Denna lättanvända dyna är idealisk för fritids- och vardagsbruk och både dyna och överdrag är tvätt- och torktumlingsbara.

StimuLITE Corbee Barndyna är konstruerad för prestanda och komfort och ger maximal tryckavlastning. Den är baserad på bevisade avlastningsegenskaper i mjukt och flexibelt material som anpassar sig till kroppsformen. Honeycombs naturliga förmåga att ge jämn viktfordelning, återta sin ursprungliga form och vara stötdämpande ger maximal tryckavlastning och hjälper till att förebygga vävnadsskador.

StimuLITE Corbee Barndyna reducerar inte bara tryck och skjuvning till ett minimum utan även fukt, vilken annars kan leda till hudskörhet. Dynans unika ventilationssystem, perforerad honeycomb i bikakestruktur och luftgenomsläppligt överdrag med sidonät, gör att StimuLITE-dynan låter luft cirkulera och fukt

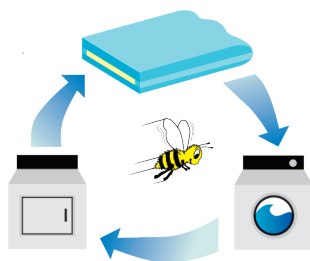

avdunsta, och håller barnen svala och torra även i varmt och fuktigt klimat.

Dynan väger 1/2 - 1 kg, beroende på storlek, och är till 100% gjord av termoplastisk polyuretan – ett medicinskt godkänt material som motverkar förekomsten av svamp, bakterier och dålig lukt. Ren hud är frisk hud och med dynans antibakteriella egenskaper jämte den bekväma maskintvätten är det lätt att hålla god hudhygien.

För barn med inkontinens kan ett inkontinensskydd placeras inuti överdraget, under dynan. Vätskan dräneras genom dynan och huden hålls torr. StimuLITE Corbee Barndyna skyddar barn mot trycksår, skjuvning och hudskörhet och ger maximal tryckavlastning.

StimuLITE rullstolsdyna för barn har 2 års garanti.




Total Pressure Management™

Motverkar hudskörhet

Hudskörhet är uppluckrad hud som förorsakas av kontinuerlig exponering för kroppsvätskor eller fukt.

Uppmjukad eller skör hud har sämre motstånd mot tryck och det kan orsaka nedbrytning. StimuLITE honeycomb, bikakestruktur, är perforerad, vilket gör att luft cirkulerar genom dynan och fukt avdunstar. Ett överdrag med luftgenomsläpp ventilerar bort fukt och håller huden torr. Både dyna och överdrag är tvätt- och torkbara i maskin och gör det lätt att hålla god hudhygien.


Andas och avdunstar fukt.

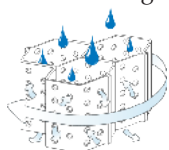

Komplett ventilationssystem

Tryckavlastning


Honeycomb-strukturen ger jämn tryckavlastning. StimuLITE dynan avlastar tryck från känsliga områden och gör att utskjutande sittben känner samma tryck som den omgivande sittytan. StimuLITE Corbee Barndyna anpassar sig till barnets kroppsform och ger jämn viktfordelning på en större yta än vad andra tryckavlastande dynor gör.

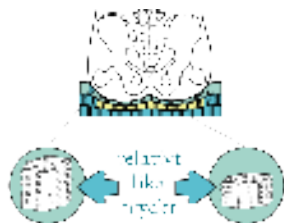

Lågt belastningsområde Högt belastningsområde
Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

Den horisontella fastheten i dynans material bestämmer dess skjuvmotstånd och stabilitet. För mycket fasthet ökar skjuvkrafterna medan för liten fasthet försvagar stabiliteten. StimuLITE-dynan med dess två lager minimerar skjuvning utan att minska stabiliteten. Det anpassliga övre lagret har låg horisontell fasthet för att åstadkomma reducerade skjuvkrafter mot huden. Det nedre lagret har högre horisontell fasthet för förstärkt stabilitet. Det elastiska överdraget arbetar tillsammans med honeycomb för att sprida sidokrafterna mot huden.

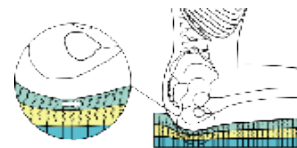

minimal skjuvkraft mot vävnader
Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Corbee Sittdyna för barn

StimuLITE Corbee Barndyna har konstruerats med hänsyn till både barn och föräldrar och kan tvättas och torkas i maskin. Denna lätta, underhållsfria dynan håller barnen svala, torra och bekväma hela dagen. Den perforerade honeycomb-strukturen och det luftiga överdraget fungerar som ett inbyggt ventilationssystem – det låter luft cirkulera och avleder fukt för att förhindra hudskörhet.

StimuLITE Honeycomb sittdynor är de enda dynor som motverkar alla orsaker till trycksår.

StimuLITE Barndyna finns också med rund botten för rullstolar med hängmattesits. Den rundade botten ersätter behovet av sittinlägg för att jämna sittytan. Genom att mäta barnets rullstol avgör man lätt om det finns behov av en dyna med rund botten. Placera en linjal tvärs över rullstolens sittrör och mät avståndet från mitten av linjalen till sittskynkets mitt. Dynan med rund botten rekommenderas om djupet är 2,5 cm eller mer. StimuLITE Corbee Barndyna standardmodell med plan botten är tillräcklig om hängmattan är mindre än 2,5 cm.


StimuLITE Corbee Barndyna Storlek (sittbredd x sittdjup) x 5cm Rundad botten +S (t.ex. PD1010S)			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
PD1010	26x26cm	PD1314	33x36cm
PD1212	31x31cm	PD1414	36x36cm
PD1214	31x36cm	PD1416	36x41cm
PD1213	31x33cm	PD1616	41x41cm
PD1214	31x36cm		

Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för rullstolar med hängmattesits mer än 2,5 cm.

Max storlekar:
PD1616 plan botten (41x41cm)
PD1516S rund botten (38x41cm)


Överdrag:
Cordura: COVPD + storlek
Ullfrotté: WCOVPD + storlek
Glidöverdrag: COVOUTPD + storlek

Låg vikt - 0,5 - 1 kg
Tjocklek ca 5 cm
Max brukarvikt 50 kg

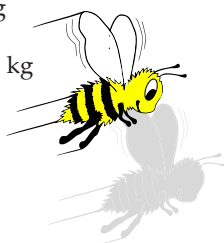

StimuLITE Inkontinensinlägg Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN1010	26 x 26 cm
IN1212	31 x 31 cm
IN1414	36 x 36 cm
IN1515	38 x 38 cm
IN1518	38 x 46 cm
IN1616	41 x 41 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

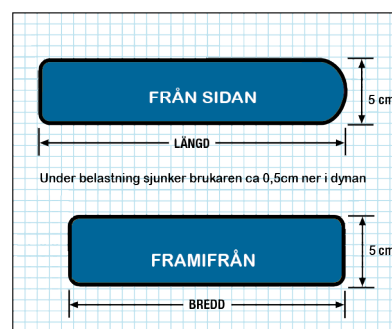

Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



SVENSK MILJÖBAS



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se