



StimuLITE®


SILVER SITTDYNA

TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

Luftgenomsläppligt överdrag för bästa möjliga ventilation

Kan tvättas i maskin och torktumlas


Perforerad bikakestruktur för bästa luftcirkulation, för att förhindra ansamling av fukt

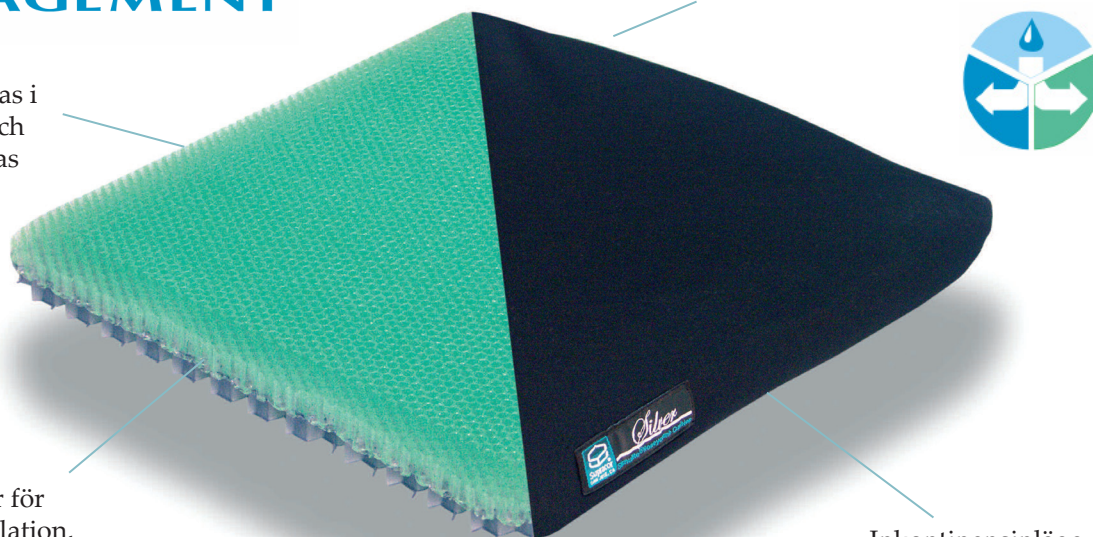

Inkontinensinlägg (tillbehör)

SUPERLÄTT MED ENANSTÄENDE KOMFORT

StimuLITE® Silver sittdyna är utvecklad speciellt för att utöka sittkomfort i rullstolar och vanliga sittstolar för personer med ökad smärt- och tryckkänslighet. StimuLITE Silver sittdyna med bikakestruktur har mycket låg vikt, väger ca 1 kg och är lätt att ha med för dem som behöver optimal tryckutjämning hela dagen.

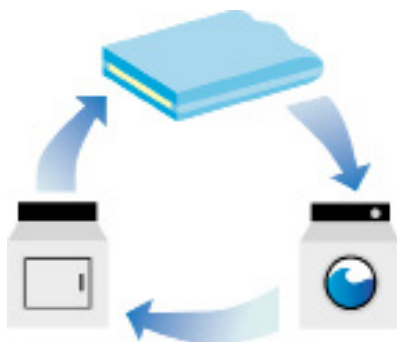

och kan torktumlas. För inkontinensproblem finns ett inkontinensinlägg som placeras under dynan. Både överdraget och dynbasen tål kontakt med urin.

Två olika fasta skikt av bikakestrukturen låter sittbenknölna sjunka in i dynan. Resultatet blir en anpassning av dynan till kroppen, vilket leder till en jämn tryckfördelning och utomordentligt stabilitet för användaren och är särskilt bra för hemiplegiker

Materialet är antibakteriellt och minskar uppkomsten av lukt vid regelbunden rengöring. Dynan och överdraget är maskintvättbara

Den främsta orsaken till att trycksårsproblem uppstår är tryck, sjukkraft och fukt vilket gör huden skör. StimuLITE Silver sittdyna minskar tryckbelastning, reducerar uppkommande skjuvkrafter och friktion samt avleder fukt vilket förhindrar uppmjukning av huden.

Den perforerade bikakeformen främjar luftcirkulationen som avleder fukt. Ett luftgenomsläppligt överdrag med öppningar runt om på sidorna kompletterar effektivt detta ventilationssystem.



Total Pressure Management™

Förebygger Hudskörhet


Fuktighet "mjukar upp" huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska.

Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE Silver sittdyna

erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur, honeycomb, och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

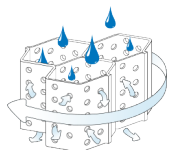


Komplett ventilationssystem

Tryckutjämning


StimuLITE Silver sittdynans cellkonstruktion former sig efter kroppen och fördelar trycket över en maximal yta, vilket också ger en mycket god komfort.

StimuLITE Silver sittdyna har en låg höjd på cellerna vilket betyder att personer utan känsel eller i hög risk att få trycksår ska överväga att använda StimuLITE Contoured eller StimuLITE Classic sittdyna.

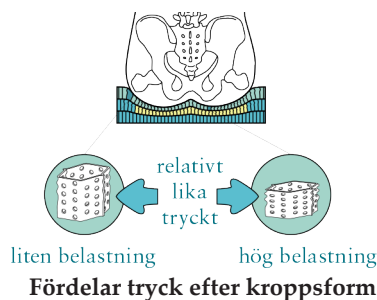

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE Silver dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

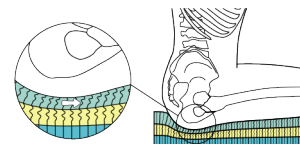

minimal skjuvkraft mot vävnader

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Silver Sittdyna

StimuLITE Silver sittdyna har låg vikt, är nästan skötselfri, och erbjuder mycket bra tryckutjämning. Dynan är lätt att hålla ren och kan tvättas i maskin samt torktumlas, vilket underlättar för inkontinenta personer. Den tvåskiktiga cellkonstruktionen erbjuder individuell anpassning och form, fördelar tryck samt ger stabilitet. Dynans perforerade cellkonstruktion tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta så att sittytan förblir torr. Användaren håller sig torr och sval, även under pågående dagliga aktiviteter. Det unika ventilationssystemet reducerar risken för hudskörhet och erbjuder optimal tryckfördelning. Som extra tillbehör finns en liten väska som kan fästas med kardborre på dynans undersida, för nycklar, planbok.

- Låg vikt - 0,5 - 1 kg
- Tjocklek ca 2,5 cm
- Max brukarvikt 130 kg.

StimuLITE SilverSittdynor			
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 2,5cm			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
SI1414	36x36cm	SI1716	43x41cm
SI1416	36x41cm	SI1717	43x43cm
SI1418	36x46cm	SI1718	43x46cm
SI1420	36x51cm	SI1720	43x51cm
SI1516	38x41cm	SI1816	46x41cm
SI1517	38x43cm	SI1817	46x43cm
SI1518	38x46cm	SI1818	46x46cm
SI1520	38x51cm	SI1820	46x51cm
SI1616	41x41cm	SI2016	51x41cm
SI1617	41x43cm	SI2018	51x46cm
SI1618	41x46cm	SI2020	51x51cm
SI1620	41x51cm		

Andra storlekar kan fås på beställning.


Max storlek:
SI2020 plan botten (51x51cm)

Överdrag:
Cordura: COVSI + storlek
UIlfrotté: WCOVSI + storlek
Glidöverdrag: COVOUTSI + storlek
Vattentätt: WPC + storlekskod

Tillbehör:
Inkontinensinlägg (IN + storlek), ficka till överdrag (DPOCKET), positioneringskil (KIL)

StimuLITE Inkontinensinlägg	
Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

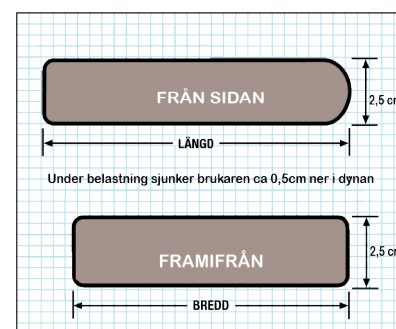

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
email: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se