




# StimuLITE®

## SLIMLINE™ SITTDYNA

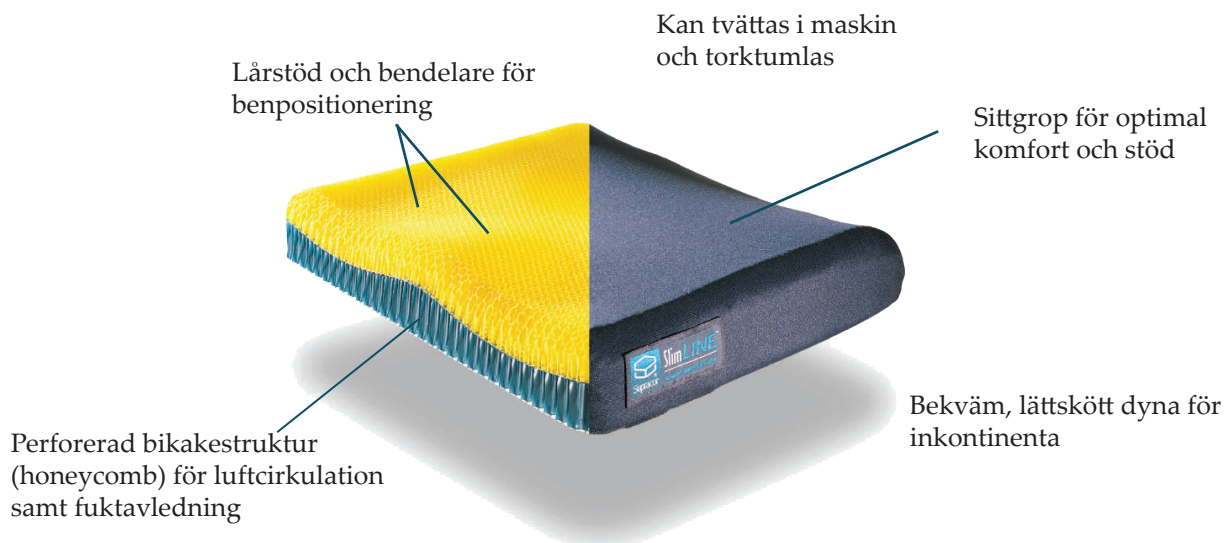

### TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

#### KOMFORTABEL STABIL OCH MASKINTVÄTTBAR

StimuLITE® Slimline™ sittdyna är avsedd för personer med känsel eller i låg risk att få trycksår. StimuLITE Slimline erbjuder optimal komfort och lite skötsel. Ett unikt ventilationssystem samt låg vikt gör den idealisk för rullstolsaktiviteter.

Dynan är tillverkad i bikakestruktur, honeycomb, en cellkonstruktion som är mjuk, flexibel och som andas samt formar sig efter kroppen anisotropisk. StimuLITE Slimline består av öppna celler i två lager som är förbundna med varandra.

Dess unika cellstruktur fördelar vikten jämnt och är stödupptagande vilket utjämnar punkttryck och förebygger vävnadsskador.

För att minska skjuvning och friktion, rör sig cellväggarna vid kroppens rörelser. Cellväggarna är perforerade för att luft skall cirkulera och fukt avledas, vilket motverkar hudskörhet samt håller huden torr och sval.

Lårstöd, bendelare och en sittgrop formad efter kroppen för att ge optimal komfort och stöd.

StimuLITE Slimline är tvättbar i maskin och kan torkas i torktumlare. Dynan är gjord av 100% TPU en medicinskt godkänd produkt. StimuLITE Slimline sittdyna är bakteriefrånstötande och luktfri.

För användare som är inkontinenta finns ett inkontinensskydd, som placeras inne i överdraget, under dynan, vilket gör att vätskan rinner igenom dynan och håller huden torr.

StimuLITE Slimline erbjuder optimal tryckavlastning, mikroklimat och minskar risken för skjuvning. Dynan är också för övrigt skötselfri vilket gör Slimline sittdyna till den moderna lösningen för att förebygga trycksår.

**Vid utrangering, återvinn plasten, genom plaståtervinning. StimuLITE rullstolsdyna har 2 års garanti.**






## Total Pressure Management™

### Förebygger Hudskörhet

Fuktighet mjukar upp huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska. Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE Slimline™ sittdyna erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur, honeycomb, och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.

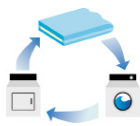


Andas och avdunstar fukt.



Komplett ventilationssystem


### Tryckavlastning

StimuLITEs Slimline sittdynans cellkonstruktion formar sig efter kroppen och fördelar trycket över en stor yta, vilket ger optimal tryckavlastning. StimuLITE Slimline har en låg höjd på cellerna vilket betyder att personer utan känsel eller i hög risk att få trycksår skall överväga att använda StimuLITE Contoured eller StimuLITE Classic sittdyna.

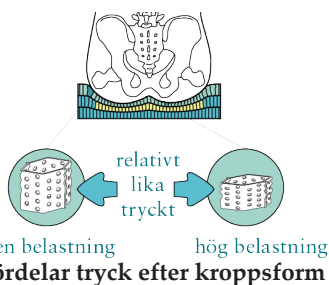

### Reducerar skjuvkraft

StimuLITE Slimline sittdynans två skikt minimerar skjuvning utan att göra avkall på stabiliteten. För att reducera sjukraften rör sig cellväggarna vid kroppsrörelse. Det följsamma toppskiktet rör sig lateralt med användaren för att reducera sjukraften mot huden, medan det undre skiktet förblir stadigt. Dynans stretchbara överdrag verkar också i lateral riktning och minskar därmed skjuvkraften mot huden.

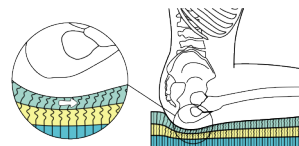

Diffus lateral skjuvkraft

### StimuLITE Slimline Sittdyna

StimuLITE Slimline sittdyna erbjuder bra komfort för användare med låg risk för att få trycksår. Den har låg vikt tack vare sina många hål som också ger det unika ventilationssystemet. Den avlastar också tryck tack vare cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt och att cellerna formar sig efter kroppen. Tvättbar i maskin, samt går att torktumla. Denna lättskötta dynan håller sig ren och i god kondition under lång tid. En rundad botten går att få för rullstolar med hängmattesits, mer än 2,5 cm.

- Exceptionellt bra sittkomfort
- Låg vikt, ca 1 kg, tjocklek 6 cm
- Unikt ventilationssystem
- Tvättbar i maskin, torktumlas
- Erbjuder optimal tryckutjämning
- Finns med rundad botten för hängmattesits
- Max brukarvikt 130 kg


### Tillbehör: StimuLITE Svankstöd

Ett stabilt svankstöd kombinerad med bra passform, användbart i t.ex. rullstol, kontorstol, eller i bil. Köpes separat. Art nr: LSUPP

StimuLITE Slimline Sittdynor			
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm			
Rundad botten +S (SM1414S)			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
SM1414	36x36cm	SM1716	43x41cm
SM1416	36x41cm	SM1717	43x43cm
SM1418	36x46cm	SM1718	43x46cm
SM1420	36x51cm	SM1720	43x51cm
SM1516	38x41cm	SM1816	46x41cm
SM1517	38x43cm	SM1817	46x43cm
SM1518	38x46cm	SM1818	46x46cm
SM1520	38x51cm	SM1820	46x51cm
SM1616	41x41cm	SM2016	51x41cm
SM1617	41x43cm	SM2018	51x46cm
SM1618	41x46cm	SM2020	51x51cm
SM1620	41x51cm		
Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för rullstolar med hängmattesits mer än 2,5 cm.			
Max storlekar: SM2020, SM2020S (51x51cm)			
Överdrag: Cordura: COVSM + storlek Ullfrotté: WCOVSM + storlek Glidöverdrag: COVOUTSM + storlek			

StimuLITE Inkontinensinlägg	
Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

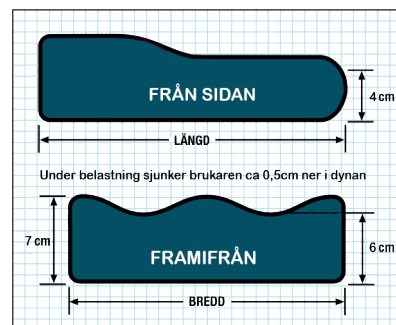

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB  
Bultgatan 17  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: 031-52 18 95  
Fax: 031-52 18 92  
goran@rehabshop.com  
www.rehabshop.se