




Göran Sjödén's

REHABSHOP

**STIMULITE
TRYCKAVLASTANDE
MADRASSER**

Stimulite® 3-zons madrass system

Optimal tryckavlastning för akut och långsiktig vård

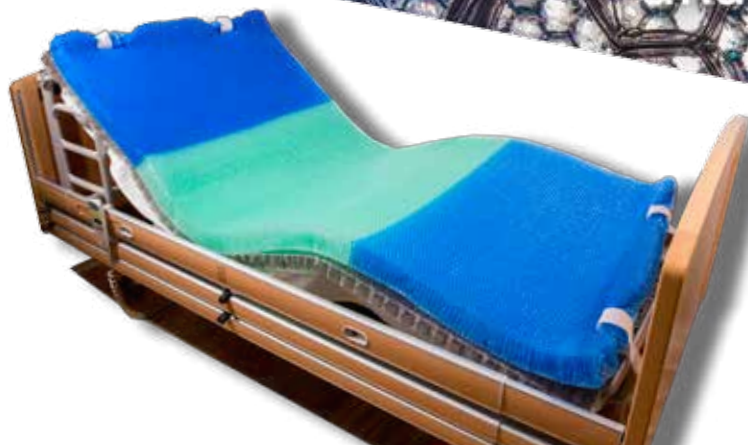

Stimulite 3-zons madrass: Användes i både sjuk- och hemvård, till smärtlindring och trycksårsbehandling upp till sårgrad 3.

Stimulite 3-zon madrass är en statisk madrass med trycksårsförebyggande och tryckavlastande egenskaper. Madrassen består av en över- och en underdel och är lämplig för vård av brukare med trycksår upp till sårgrad 3 eller med behov av smärtlindring. Madrassen är avsedd för bruk på sjukhus eller i hemmiljö. madrassens överdel kan också användas som bäddmadrass ovan på en vanlig madrass. Med sin låga höjd på 12 cm är Stimulite madrassen särskilt lämplig för brukare som vill flytta mellan säng och rullstol utan höjdskillnader. Stimulite madrassen är ljudlös, skötselfri, och har lågt vikt.

Madrasskärnan är konstruerad av sexkantceller i bikakestruktur (Honeycomb) och består till 100% av medicinsk godkänd termoplastisk polyuretan (TPU). Alla delar i madrassen tål kontakt med fukt eller kroppsvätskor, inklusive urin. Stimulite madrasser, liksom alla andra Stimulite produkter, erbjuder "Total Pressure Management": Tryckavlastning, minskad skjuvning samt ventilation. Brukarvikt för vuxenmadrasser är 25-180 kg, och för barnmadrasser mellan 0-50 kg. Stimulite madrasser erbjuds i tre bredder: 82,5 cm, 85 cm, och 90 cm. Längden är 200 cm. Vid behov levereras Stimulite madrasser med ett ångpermeabelt men vattentätt hygienöverdrag. Vill man till fullo utnyttja madrassens ventilerande effekt användes ett vanligt lakan.

Stimulite madrasser finns i tre utformningar:

Som övermadrass / bäddmadrass:

- Vid behov av maximalt tryckavlastning och ventilation.
- En lättanvänd madrass som passar på de flesta sängar / madrasser / sänggramar.
- Lätt att flytta med till för exempel sommarboende
- Följsam vid användandet av en reglerbar fot- och huvudända då de inte bildas några veck i vinklarna
- 3-zon koncept med mjukare huvud- och fotdel

Som helmadrass:

- Vid behov av maximalt tryckavlastning och ventilation.
- Låg madrass (endast 12 cm) som ändå ger trycksårsbehandling upp till grad 3. Har man behov av det kan man dela på produkten och använda överdelen som en toppmadrass vid ex resa.
- Madrassbasen levereras i två fasthetsgrader:
 - mjuk: för ökat komfort
 - fast: för ökat stöd under för flyttning och lägesändringar

Som barnmadrass:


- Vid behov av tryckavlastning och ventilation för barn upp till 50 kg.
- Används som hel- eller övermadrass

Ventilation och Dränering: Madrasskärnan är konstruerad av sexkantceller i bikakestruktur och består av 7% material och 93% luftvolum. Madrassen har ett ventilations-system eftersom cellerna är öppna på övre sidan samt att sidoväggarna och cellbotten är perforerad. När brukaren rör sig, kan luft cirkulera genom cellerna och fukt avdunsta. Detta förebygger den hudskörhet som kan uppstå till följd




av kontinuerlig exponering för värme, kroppsvätskor eller fukt och reducerar även risken för svampinfektioner.

Fuktig hud är skörare och detta kan leda till sår. En torr och sval hud däremot är en stark hud. Stimulite madrassens sexkantceller kollapsar inte under belastning och madrassen bibehåller sin ventilationsfunktion även vid långvarig belastning. I en klinisk studie genomförd av laboratoriet Swerea IVF i Mölndal, blev kroppstemperaturen på kontaktytan mellan brukaren och madrassen 1°C svalare när brukaren låg i 3 timmar på en Stimulite madrass jämfört med en skummadrass som är vanligt förekommande inom sjukvården och används som en trycksårspåbyggande madrass. Fuktigheten på hudens yta efter 3 timmars liggande var 10% mindre på Stimulite madrassen jämfört med referensmadrassen och låg dessutom lägre än rummets luftfuktighet.

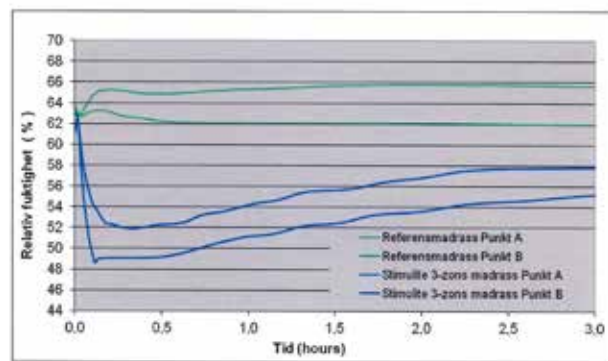

Figur 2 Uppmåttade RF-nivåer under 3 timmar.

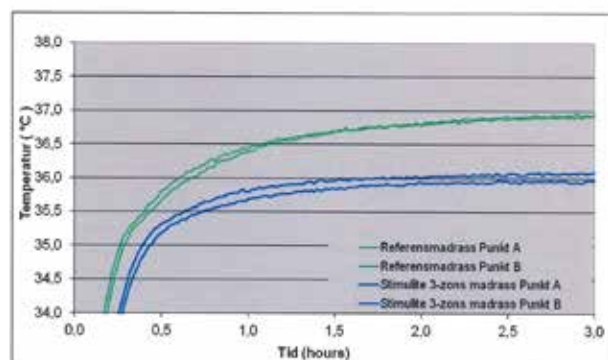

Figur 3 Uppmåttade temperaturnivåer under 3 timmar.

Madrassen är konstruerad av termoplastisk polyuretan, ett material som inte absorberar vätska. Materialet är naturligt antibakteriellt och tar inte åt sig lukt efter tvätt. Detta betyder att madrassen tål kontakt med urin och andra kroppsvätskor. Madrassen levereras som standard med ett ångpermeabelt, men vattentätt hygienöverdrag. Alternativt kan ett vanligt lakan eller Stimulites bomulls komfortöverdrag användas i samband med en inkontinens- och fuktuppsamlare som läggs under madrassen. Urin är frätande på huden vilket ökar risken för att hudsprickor uppstår. Stimulite madrassen dränerar urin om man använder den på ovan sätt.



Rengöring: Alla delar av Stimulite madrassen kan lätt rengöras. Madrasskärnans båda delar kan antingen duschas och tvättas med tvål, eller tvättas i 85 °C i 10 minuter, alt. 60 °C i 30 minuter i en stor tvättmaskin med kulör- eller fintvättmedel som inte innehåller blekningsmedel. Använd inget mjukmedel. Madrasskärnans båda delar kan torkas i torkskåp eller torktumlare på låg värme. Hygienöverdraget och inkontinens- och fuktuppsamlaren kan maskintvättas i 95 °C och torktumlas, alt. läggas i autoklav. Stimulite komfortöverdrag kan tvättas i 60 °C samt torktumlas. Madrasskärnans båda delar kan också desinficeras med klorfritt medel, exempelvis Virkon. Hygienöverdraget kan torkas av med sprit.

Stimulite Övermadrassen, Madrassbasen, Barnmadrassen, Komfortöverdrag:




Stimulite Hygienöverdrag och inkontinens/fuktuppsamlare:




Temperatur: Stimulite madrassen bibehåller sin fulla tryckavlastande och ventilerande funktion oavsett rumstemperatur och även oavsett om den är blöt eller torr.


Tryckavlastning och Smärtlindring: Stimulite madrassen är tryckavlastande och kan användas för brukare med ligg eller sittersår upp till sårgrad 3 utan att förhindra läkningssprocessen. Sexkantcellerna, som består av omväxlande tjocka och tunna, sammanbundna celler, anpassar sig individuellt när de komprimeras. Cellerna formar sig efter kroppens struktur och ger relativt lika mycket motstånd oavsett om cellen komprimeras eller inte. När sexkantcellerna formar sig efter kroppen ställer sig cellväggarna vinkelräta mot den. Detta stödjer brukaren när den ligger och möjliggör det även för brukare med nedsatt rörelseförmågan att lätt vända eller förflytta sig till rullstol.

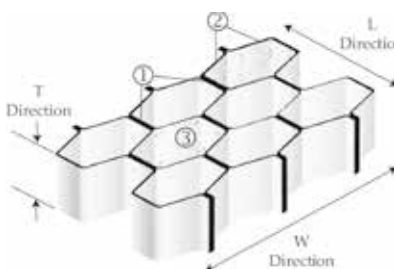


Madrassens mjuka sexkantceller är anisotropiska, dvs. de rör sig i alla riktningar. Därmed följer cellerna brukarens alla rörelser utan att ge friktion mot brukarens hud. Detta minskar skjuvkraften och minskar irritation på känslig och ömtålig hud.

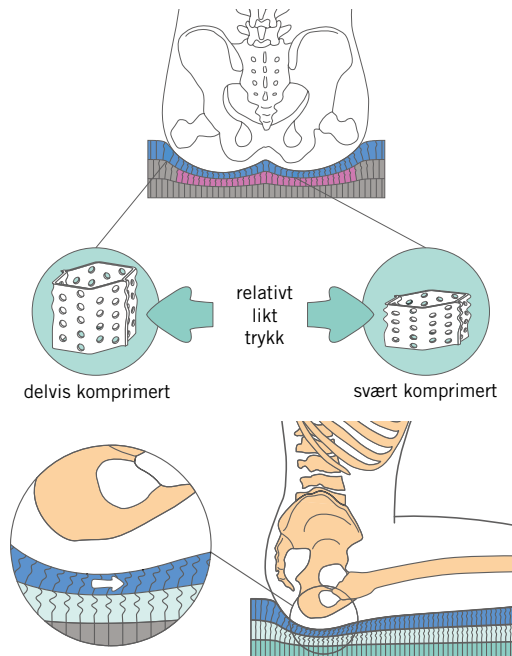

Tack vare sin cellstruktur består madrasskärnan av bara 7% material och resten är luftvolym. Därmed får bara en liten andel av kroppen direkt kontakt med madrassmaterialet, medan resten av kroppen ligger utan mottryck. Cellväggskanten masserar vid rörelser brukarens hud, vilket stimulerar blodcirkulationen. Detta ger brukaren mindre domningar och tryckrelaterad smärta som kan uppstå när man sitter eller ligger för långa stunder utan att lägesändra. I kombination med cellernas följsamhet gör detta madrassen väldigt komfortabel för smärtekänsliga brukare, till exempel vid palliativ vård.

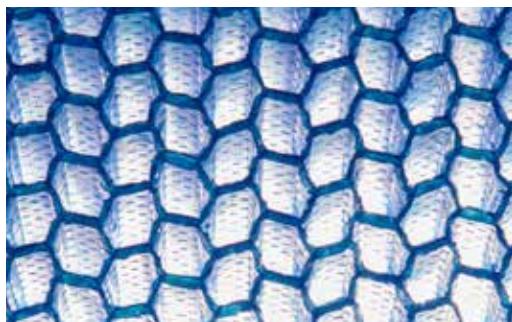

Jämförande redovisning av tryckmätning: Stimulite fördelar och utjämnar vikt över en bredare yta än konventionella madrassmaterial. Med hjälp av FSA System för redovisning av tryckmätning, aktiveras 323 sensorer på en Stimulite madrass jämfört med 305 sensorer på en konventionell madrass. Testresultaten visar också väsentligt lägre tryck på Stimulite-madrassen.

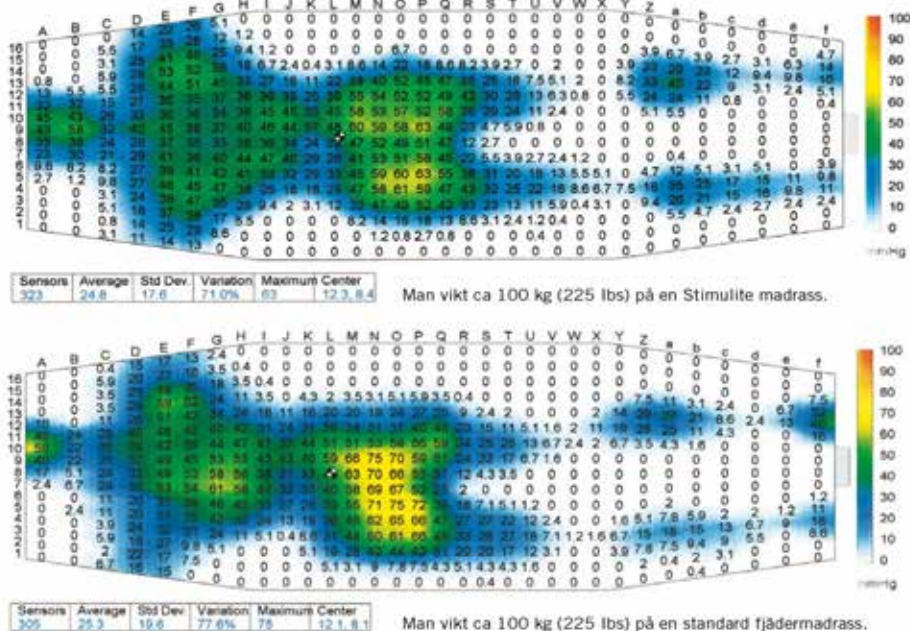


Stimulite madrasser rekommenderas till användning för patienter med trycksår upp till sårgrad 3 enligt definition av NPUAP-EPUAP.

Allergi: Madrassens kärna och överdrag innehåller inga tillsatser, till exempel ftalater, latex, fiber, eller andra allergener, vilket gör madrassen lämplig till användning även för allergiska brukare eller dem som har nedsatt immunförsvar. Madrassen levereras med en hudvänligt, ångpermeabelt, Oeko-Tex certifierat hygienöverdrag av polyester och polyuretan. Hygienöverdraget är vävt tillräckligt tätt för att också fungera som kvalsterskydd. För hudkänsliga brukare kan komfortöverdraget i 100% Oeko-Tex certifierat bomull beställas som tillbehör.

Brukaranpassning: Stimulite madrasser har ingen pump. Madrassens överdel anpassar sig till brukarens kropp. Madrassens överdel består av sexkantceller som individuellt formar sig efter kroppen och är uppdelad i tre sektioner med olika fasthetsgrad för att möta alla kroppsdelars olika former och tyngd: Mittdelen har högst fasthet för att ge tryckavlastning till kroppens bål och bäcken samtidigt som den stöder och stabiliserar brukaren under ställningsändringar. Huvudändan är mjukare för att ge tryckavlastning och stöd för den mer punktuella belastningen som utgår från skuldror och armbågar. Fotändan är mjukast för att ge optimal tryckavlastning på hälar och maleoler även vid långtidsliggande.



Madrassens underdel har två utformningar med olika fasthetsgrader: Den fasta varianten består av större, mycket bärkraftiga sexkantceller, den mjuka av individuell flexibla kuber i Waterlilly miljöskum som anpassar sig efter kroppen för maximal tryckavlastning. Den mjukare varianten

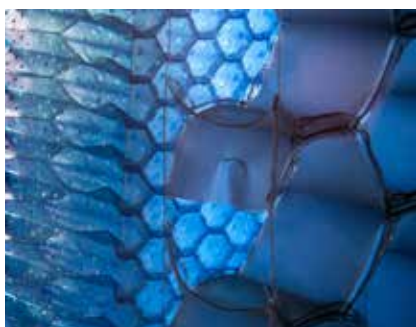

rekommenderas för brukare med ökat komfortbehov, till exempel vid palliativ vård eller smärta. Den fastare varianten rekommenderas för brukare med nedsatt förmågan att vända och förflytta sig, eftersom den ger ökad stabilitet under ställningsändringen.

Barnmadrassen kan användas både som övermadrass eller helmadrass beroende på barnets behov av komfort och stabilitet. En studie av Sovlaboratoriet för barn på Universitetssjukhuset i Dresden (Institute for Occupational Medicine of the Medical Department of the Technical University of Dresden) pekade ut farliga CO₂- och värmekoncentrationer i flera testade miljövänliga baby-madrasser, vilket är två ledande orsaker till plötslig spädbarnsdöd. Studien testade hur mycket av CO₂ som utandas i madrassen uppmättes under madrassen. Miljömadrasser som innehåller latex och kokosnötfiber i madrasskärnan hade sämst resultat med bara 20% av CO₂ genomsläppt, en ordinär kommersiell skumgummimadrass tillät 46% CO₂ genomsläpp. Stimulite barnmadrass presterade bäst i test med en CO₂ genomsläpp av 92%. Testrapporten



rekommenderade "Babymadrasser av por-, skum- eller bikakestruktur som endast kan pressas ihop i begränsad omfattning är att föredra. Sängbotten skall också tillåta luftcirkulation. Detta är också att rekommendera ur allergisynpunkt för att förhindra förekomsten av damm och kvalster."





Enkel och säker användning: Stimulite madrassen är mycket enkel och säker i sin användning. Eftersom madrassen inte har några elektriska delar, kan madrassen inte förlora sin tryckavlastande funktion under ett strömavbrott eller en elektriskt eller mekaniskt haveri. Tack vare sin konstruktion är madrassen punkteringsfri och kräver väldigt lite reparations- eller servicearbete från vårdgivaren eller förskrivaren. Madrassen utsöndrar inga lösa partiklar vid slitage eller åldrande. Madrassen är därför mycket lämplig i situationer utan konstant tillsyn, som till exempel i hemvårdsmiljöer och vid brukare med nedsatt kognitiv funktion som ändå vill kunna sköta sina hjälpmedel själv, samt för användning i psykvården. Madrassen är mycket lämplig för ljudkänsliga brukare som inte blir störda av pumpljud. Madrasskärnan och överdraget är flamsäkert och brandtestat enligt EN-597, samt CE-märkta.



Med sin låga vikt går övermadrassen lätt att ta med vid förflyttning. Ska brukaren flyttas för en kortare period, kan madrassen delas och bara överdelen användas som övermadrass på en vanlig säng. Madrasskärnan går att rulla ihop och bära med i en medföljande bärkasse. Hela madrassen väger 12 kg med fast botten, 17kg med mjuk botten, övermadrassen väger 7 kg. Madrassöverdelen levereras med evakueringsband.

Miljö: Stimulite madrasser tillverkas av 100% termoplastisk polyuretan av medicinsk godkänd kvalitet (samma material används till exempel för hjärtklaffar som opereras in i kroppen). Materialet innehåller inga giftiga eller allergiframkallande tillsatser. Eftersom madrassen kan tvättas och desinficeras kan den lätt rekonditioneras för återanvändning med flera brukare vilket ökar livslängden för produkten. Madrasskärnan består av två delar. Är till exempel övermadrassen förbrukad och behöver kasseras, men undermadrassen är fortfarande i gott skick, kan den förbrukade övermadrassen återvinnas i plaståtervinning och ersättas med en ny övermadrass. Detta minskar materielmängden som behöver slängas och är bra för miljön. Hygienöverdrag och inkontinens/fuktuppsamlare till Stimulite madrasser är tillverkad av Oeko-Tex certifierad polyester och polyuretan (överdrag) samt bomull (fuktuppsamlare). Överdragen och fuktuppsamlare kan tvättas i 95 °C. Efter förbrukning kan dessa sorteras som brännbart. Komfortöverdragen till Stimulite madrasser är tillverkad av Oeko-Tex certifierad bomull. Överdragen kan tvättas i 60 °C. Efter förbrukning kan den sorteras som brännbart.

Göran Sjödéns Rehabshop Norge AS och dess moderbolag Göran Sjöden Rehabshop AB är ansluten till Grøne Punkt/ Förpaknings och tidnings insamlingens återvinningsprogram för att få kasserade madrasser och förpakningsmaterial återvunnet lagenligt. Göran Sjödéns Rehabshop AB är miljöcertifierad enligt Svenskt Miljöbas.

Garanti / Livslängd: Stimulite madrasser kommer med 2 års garanti. Detta gäller material- och produktionsfel, men inte vanlig slitage eller skador till följd av misskötsel eller åsidosättande av bruksanvisningen och i synnerhet tvättinstruktionen. Madrasskärnan har en genomsnittlig livslängd av ca 5 år. Hygien- och komfortöverdrag till Stimulite madrassen tål ca 100 tvättar.



SVENSK MILJÖBAS



Tillbehör till Stimulite Madrasser

Stimulite Tryckavlastande Mattor SBS: Stimulite Tryckavlastande Mattor är flexibel och mångsidig och kan användas överallt där ökad tryckavlastning och luftventilation behövs. Några exempel är positioneringsanvändningar eller vid långvarig liggande, i formgjutna sitsar, vid badrumsanpassningar, eller för luftgenomsläppliga ryggstöd. Materialet är slitstark och kan skäras med kniv i vilken storlek som helst och följer alla former. Vid fixering kan kardborre- eller knutfäste limmas eller sys fast med en industriell symaskin. För kroppsnära positioneringsytor kan man använda Stimulite Honeycomb matta med tygöverdrag på ena sidan. Till skillnad från många andra material, påverkas detta avancerade material inte av kroppsvätskor och är luktresistent efter tvätt. Materialet kan maskintvättas i 85 °C i 10 minuter, alt 60° i 30 minuter och torktumlas. Kan också desinficeras med Virkon. Är man extremt känslig mot tryck, finns Stimulite Honeycomb mattan nu också i extra mjukt utförande.



Stimulite Häl- och Maleolskydd: Ett av det mest utsatta områden för trycksår är runt häl och foten. Stimulite Heelboot är lätt och bekväm att bära. Produkten är avsedd för personer med ökad risk för att utveckla trycksår runt hälen och fotleden samt vid ökad smärtproblematik i detta område. Det unika häl och fotavlastningsmaterialet med Stimulite bikakestruktur är bara 3 cm tjock och tryckavlastar på ett mycket effektivt sätt regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus området. Stimulite Heelboot minskar skjuvning då cellerna rör sig när foten rör sig, samt att passformen är följsam längs foten. Detta är viktigt när man rör sig i sängen, men också när man har okontrollerade rörelser samt vid sittande i rullstol. Heelbooten kan användas dygnet runt och det går bra att ta några steg vid behov tack vare sin anti-halk sula. Den är lätt att hålla ren. Maskintvättas i 85 °C i 10 minuter, alt 60 °C i 30 minuter. Torktumlas i låg värme. Produkten kommer färdig att användas. Det finns inga lösa delar eller inställningar.



StimulITE Heelboot Storlekar			
	Small	Medium	Large
Artikelnummer	HEEL-S	HEEL-M	HEEL-L
Höjd	27 cm	33 cm	36 cm
Passar skostorlek	35-41	35-45	40-48
Omkrets B (framfot)	20-32 cm	25 - 38 cm	30 - 38 cm
Omkrets A (vad)	> 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm

ten kan användas dygnet runt och det går bra att ta några steg vid behov tack vare sin anti-halk sula. Den är lätt att hålla ren. Maskintvättas i 85 °C i 10 minuter, alt 60 °C i 30 minuter. Torktumlas i låg värme. Produkten kommer färdig att användas. Det finns inga lösa delar eller inställningar.

Stimulite Huvudkudde: Kuddens ventilationssystem låter brukaren andas genom materialet. Kondens som uppstår leds bort så att huvudet förblir torr och svalt även efter långtids liggande. Naturlig antibakteriell och kvalitetsfri. Rekommenderas speciellt för personer som ligger mycket och riskerar sår på öron etc. Överdrag: i ekologisk bomull medföljer (man kan också använda vanligt kuddvar). Kudden är slät och något fastare i kanten på den ena sidan och andra sidan har fastare kant för att stödja nacken.



Stimulite Komfortöverdrag: Tillverkad av mjuk, Ökotex certifierat bomull, Stimulites komfortöverdrag känns väldigt mjuk mot huden. Överdraget finns att köpa som tillbehör till alla madrass varianter. Den är mycket luftgenomsläpplig och ger brukaren därmed full nytta av Stimulite madrassens ventilationsförmågan. Rekommenderas för brukare med ökat behov för komfort och smärtlindring, till exempel i palliativ vård.

Inkontinens/fuktuppsamlare: Tvättbar i 95 °C. Användning av fuktuppsamlaren rekommenderas när komfortöverdragen eller ett vanligt lakan används istället för hygienöverdraget. Läggs under övermadrassen för att beskydda underliggande material. Absorberar ca 1 liter vätska. Tillverkad av Ökotex certifierat material.



Stimulite Madrass Beställningsguide

Stimulite Helmadrass

Stimulite Helmadrassen är avsett för användning utan en underliggande madrass. Helmadrassen består av en avtagbart tryckavlastande övermadrass samt en bärkraftigt och stabiliserande madrassbas. Madrassbasen finns i två utföringar och fasthetsgrader: mjuk (skum) för ökat komfortbehov, fast (bika-keceller), för ökat stabilitetsbehov. Madrassen kan köpas som 3ZON paket, vilket innehåller övermadrassen, madrassbasen, ett hygienöverdrag samt en bärkasse. Alla delar i madrass paketet kan också köpas separat som reservdelar.



Brukarvikt: 25-180 kg Egenvikt: 12-19 kg

Madrasspaket Helmadrass:

Artikel	Artikel nummer	Består av
Helmadrass 82,5x200x19cm extra mjuk	3ZON82B	GSR00056, FOUNDATION33, COVIN3380B, BAG
Helmadrass 85x200x19cm extra mjuk	3ZON85B	GSR00067, FOUNDATION34, COVIN3480B, BAG
Helmadrass 90x200x19cm extra mjuk	3ZON90B	SRC00024, FOUNDATION36, COVIN3680B, BAG
Helmadrass 82,5x200x12 cm fast	3ZON82BF	GSR00056, FOUNDATION33F, COVIN3380B, BAG
Helmadrass 85x200x12 cm fast	3ZON85BF	GSR00067, FOUNDATION34F, COVIN3480B, BAG
Helmadrass 90x200x12 cm fast	3ZON90BF	SRC00024, FOUNDATION36F, COVIN3680B, BAG


Reservdelar till Helmadrassen:

Artikel	Artikel nummer	Storlek
Övermadrass	GSR00056	= 82,5x200x7 cm, 33x80x2,5"
	GSR00067	= 85x200x7 cm, 34x80x2,5"
	SRC00024	= 90x200x7 cm, 36x80x2,5"
Madrassbas, extra mjuk	FOUNDATION33	extra mjuk, till madrass 82,5 cm bredd, 12 cm hög
	FOUNDATION34	extra mjuk, till madrass 85 cm bredd, 12 cm hög
	FOUNDATION36	extra mjuk, till madrass 90 cm bredd, 12 cm hög
Madrassbas, fast	FOUNDATION33F	fast, till madrass 82,5 cm bredd, 5 cm hög
	FOUNDATION34F	fast, till madrass 85 cm bredd, 5 cm hög
	FOUNDATION36F	fast, till madrass 90 cm bredd, 5 cm hög
Hygienöverdrag	COVIN3380B	passar fast helmadrass 82,5 x 200 x 12 cm
	COVIN3480B	passar fast helmadrass 85 x 200 x 12 cm
	COVIN3680B	passar fast helmadrass 90 x 200 x 12 cm
	COVIN3380BH	passar extra mjuk helmadrass 82,5x200x19cm
	COVIN3480BH	passar extra mjuk helmadrass 85x200x19 cm
	COVIN3680BH	passar extra mjuk helmadrass 90x200x19 cm
Fuktuppsamlare	INMATT3227	80x200 cm (passar alla madrass- storlekarna)
Väska	BAG	(passar alla madrassstorlekarna)



Stimulite Bäddmadrass

Stimulite Bäddmadrassen är avsedd för användning ovanpå en vanlig madrass. Bäddmadrassen kan köpas som 3ZON paket, vilket innehåller övermadrassen, en hygienöverdrag samt en bärbasse. Alla delar i madrass paketet kan också köpas separat som reservdelar.

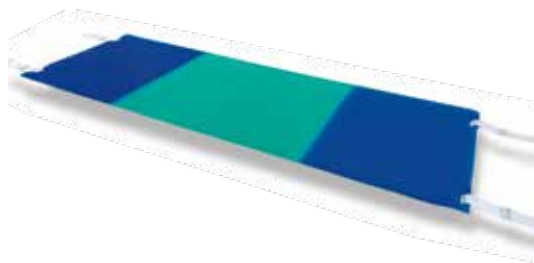

Brukarvikt: 25-180 kg Egenvikt: 7 kg

Madrasspaket Bäddmadrass:

Artikel	Artikel nummer	Består av
Bäddmadrass 82,5x200x7 cm	3ZON82	GSR00056, COVIN3380, BAG
Bäddmadrass 85x200x7 cm	3ZON85	GSR00067, COVIN3480, BAG
Bäddmadrass 90x200x12cm	3ZON90	SRC00024, COVIN3680, BAG

Reservdelar till Bäddmadrassen:

Artikel	Artikel nummer	Storlek
Övermadrass	GSR00056	= 82,5x200x7 cm, 33x80x2,5"
	GSR00067	= 85x200x7 cm, 34x80x2,5"
	SRC00024	= 90x200x7 cm, 36x80x2,5"
Hygienöverdrag	COVIN3380	passar bäddmadrass 82,5 cm bredd
	COVIN3480	passar bäddmadrass 85 cm bredd
	COVIN3680	passar bäddmadrass 90 bredd
Fuktuppsamlare	INMATT3227	80x200 cm (passar alla madrass- storlekarna)
Väska	BAG	(passar alla madrassstorlekarna)

Stimulite Barnmadrass

Stimulite Barnmadrassen kan antingen användas ovanpå en vanlig madrass eller som hel madrass beroende på barnens behov för stöd och komfort. Barnmadrassen levereras som standard med ett hygienöverdrag. Hygienöverdraget kan också köpas separat som reservdel.

Brukarvikt: 0-50 kg Egenvikt: ca 2 kg




Storlek	Bredd	Längd	Tjocklek	Hygienöverdrag som Reservdel
BASSINET	39 cm	80 cm	5 cm	COVINBASSINET
CRIBMATT2448	60 cm	120 cm	5 cm	COVINCRIB2448
CRIBMATT2456	60 cm	140 cm	5 cm	COVINCRIB2456
CRIBMATT2752	68 cm	130 cm	5 cm	COVINCRIB2752
CRIBMATT2856	70 cm	140 cm	5 cm	COVINCRIB2856
CRIBMATT2863	70 cm	160 cm	5 cm	COVINCRIB2863

Beställningar / Kundtjänst: Telefon: 031 / 52 18 95 E-post: goran@rehabshop.com




Tillbehör till Stimulite Madrasser

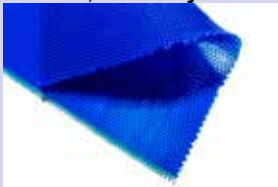Artikel	Artikel nummer	Passar till:
Komfortöverdrag	COVST4080	Passar alla madrass storlekar
Komfortöverdrag till Barnmadrass	COVSTBASSINET	BASSINET - 39x80x5 cm
	COVSTCRIB2448	CRIBMATT2448 - 60x120x5 cm
	COVSTCRIB2456	CRIBMATT2456 - 60x140x5 cm
	COVSTCRIB2752	CRIBMATT2752 - 68x130x5 cm
	COVSTCRIB2856	CRIBMATT2856 - 70x140x5 cm
	COVSTCRIB2863	CRIBMATT2863 - 70x160x5 cm
Huvudkudde 	PILLOW	49x38x9 cm
Tvättpåse för madrasskärnan	LDBAGBED	passar till alla hel- och bäddmadrasser
Häl- och Maleolskydd 	HEEL-S	Storlek Small, vad > 40 cm, skostorl 35-41
	HEEL-M	Storlek Medium, vad 40-45 cm, skostorl 35-45
	HEEL-L	Storlek Large, vad 45-50 cm, skostorl 40-48
Tryckavlastande Matta öppen två sidor 1,25 cm tjock 	SBS-1	Storlek 60x60 cm
	SBS-1 90/60	Storlek 60x90 cm
	SBS-1 / 48	Storlek 60x120 cm
	Stimulite tryckavlastande mattor rekommenderas för individuell anpassning vid behov av extra positionering och tryckavlastning, passar till alla madrasser	
Tryckavlastande Matta öppen en sida 1,25 cm tjock 	SBS-2	Storlek 60x60 cm
	SBS-2 90/60	Storlek 60x90 cm
	SBS-2 / 48	Storlek 60x120 cm
Tryckavlastande Matta öppen en sida 1,25 cm tjock - extra mjuk 	SBS-2/XS	Storlek 60x60cm

Beställningar / Kundtjänst: Telefon: 031 / 52 18 95 E-post: goran@rehabshop.com

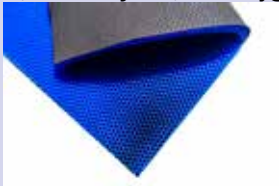

Artikel	Artikel nummer	Passar till:
Tryckavlastande Matta öppen en sida 1,25 cm tjock, med tyg 	SBS-3	Storlek 60x60 cm
	SBS-3 90/60	Storlek 60x90 cm
	SBS-3 / 48	Storlek 60x120 cm
Tryckavlastande Matta öppen en sida 1,7 cm tjock 	SBS-4	Storlek 60x60 cm
	SBS-4 90/60	Storlek 60x90 cm
	SBS-4 / 48	Storlek 60x120 cm
Tryckavlastande Matta öppen en sida 2,5 cm tjock 	SBS-5	Storlek 60x60cm
	SBS-5 90x60	Storlek 60x90 cm
	SBS-5 / 48	Storlek 60x120 cm
Tryckavlastande Matta öppen en sida 2,5 cm tjock - extra mjuk 	SBS-5 / XS	Storlek 60x60 cm
Tryckavlastande Matta, två lager, öppen en sida 2,5 cm tjock 	SBS-6	Storlek 60x60
Tryckavlastande Matta fast yta två sidor 2 cm tjock 	SBS-7	Storlek 60x60

Om Rehabshoppen

Göran Sjödén Rehabshop AB, moderbolaget till **Göran Sjödén Rehab Distributions AB** startade sin butiksverksamhet den 24 november 1995, med inriktning på produkter för hjälpmedel, träning, sjukvård, skor och skoinlägg.

Göran Sjödén's Rehabshop har sedan 1999 en affärsdel som inriktar sig på försäljning av sittdynor för trycksårsförebyggande. Här är huvudkunden landsting och kommuner. Företaget har avtal med många av landets kommuner och landsting. Sedan 2005 säljer vi även madrasser med samma teknologi som sittdynorna, för förebyggande och behandling av trycksår, till kommuner och landsting. Försäljning och lagerhållnings sköts från kontor och lager på Backa Bergö Gata 14 i Hisings-Backa, Göteborg.

För att kunna möta den ökande efterfrågan har företaget utökat sina lokaler och kommer fortsätta att investera i resurser för att förbättra och utöka e-handeln som redan idag betjänar kunder i hela Sverige. Under 2014 grundades Göran Sjödén's Rehabshop Norge AS, vilket är ett dotterbolag till Göran Sjödén's Rehabshop AB.

Företaget har elva anställda och är helägt av Göran Sjödén och Brigitte Sjödén. Göran har arbetat med antidecubitus sittdynor sedan 1981 och har god kunskap, och personlig erfarenhet inom området. Vi gör kostnadsfritt utbildning och teknisk support, runt om i Sverige och Norge enligt överenskommelse.



GÖRAN SJÖDÉN'S REHAB DISTRIBUTIONS AB

Kontor/Lager: Backa Bergö Gata 14 422 46
Hisings Backa

Tel: 031-52 18 95

Fax: 031-52 18 92

email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.se

Samtliga Stimulite®
madrass produkter är
brandtestade och
godkända enligt
ISO 7176-16 och SS-EN
597 samt CE-märkta.

GØRAN SJØDENS REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru

Tel: 48 50 32 97

email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.com



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.