




StimuLITE®

CLASSIC SITTDYNA

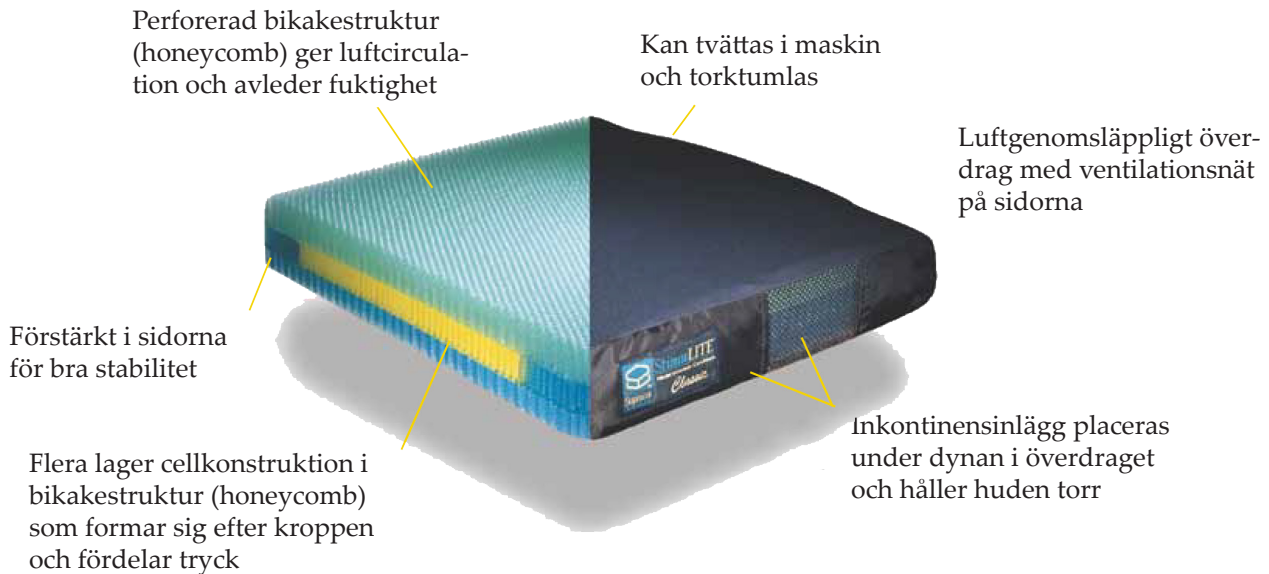

TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

UTMÄRKT STABILITET OCH TRYCKAVLASTNING MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE® Classic sittdyna består av en formbar cellkonstruktion i bikakestruktur, honeycomb, med låg vikt och excellent tryckutjämning samt fantastisk komfort.

Dynan är uppbyggd av tre skikt, varje skikt har olika hårdhet, vilket tillåter sittben att sjunka ner i dynan för avlastning, samtidigt som omliggande skikt ger stöd. Resultatet är en fantastisk sittyta med individuell passform vilket fördelar trycket efter din kroppsform och ger mycket god stabilitet.

Dynan har förstärkta kanter för ökad sidostabilitet.

StimuLITE Classic sittdyna väger ca 1,5 kg och är till 100% gjord av thermoplastisk polyuretan, bakteriefrånstötande och alstrar ingen lukt. Både sittdyna och överdrag är tvättbara i maskin och kan torktumlas. Dynan har ett unik möjlighet att dränera fukt och kroppsvätskor. Vid inkontinens placeras ett skydd under dynan. Både dynbas och skydd är tvättbart. StimuLITE sittdynor motverkar sittersår genom sina unika egenskaper. att hantera tryck, skjuvning och

friktion samt hudskörhet vid fuktexponering.

Alla StimuLITE sittdynor är gjorda av en cellkonstruktion i bikakestruktur, honeycomb, vilket medför luftcirkulation och avleder fukt.

Ett luftgenomsläppligt överdrag med ventilationsnät på sidorna kompletterar dynans ventilationssystem och håller användaren torr och sval.

Vid utrangering, återvinn plasten, genom plaståtervinning. StimuLITE CLXS rullstolsdyna har 2 års garanti





Total Pressure Management™

Förebygger Hudskörhet


Fuktighet "mjukar upp" huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska.

Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE Classic sittdyna

erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur, honeycomb, och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

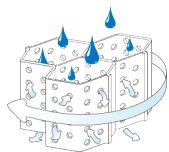


Komplett ventilationssystem

Tryckavlastning

StimuLITEs cellkonstruktion i bikakestruktur, honeycomb, ger optimal tryckavlastning.


StimuLITE sittdynor avleder tryck genom att distribuera tryck från känsliga områden. Detta resulterar i att utstående sittben känner samma tryck som närliggande kroppsdelar. StimuLITE Classic fördelar tryck från sittbenknölar och trochanter till mjukdelar under lären. Ett mjukareskikt bäddar in sittbenknölar och svanskota och förebygger att man sitter igenom.

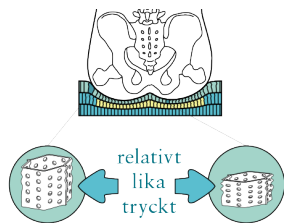

relativt lika tryck
liten belastning hög belastning
Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE Classic dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

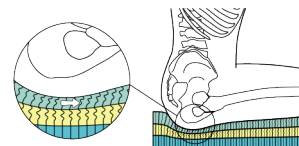

minimal skjuvkraft mot vävnader
Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Classic Sittdyna

StimuLITE Classic sittdyna har låg vikt och kräver lite skötsel samt erbjuder mycket bra tryckutjämning. Den är lätt att hålla ren och kan tvättas i maskin samt torktumlas, vilket underlättar för inkontinenta personer. StimuLITE Classic sittdyna består av tre olika skikt, vilket erbjuder individuell anpassning och form, fördelar tryck samt ger stabilitet. Den perforerade cellkonstruktionen i bikakestruktur tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta. Detta gör att användaren håller sig torr och sval. Det unika ventilationssystemet reducerar hudskörhet och erbjuder optimal trycksårsbehandling. StimuLITE Classic rund botten sittdynan tillverks för rullstolar med extrem hängmattesits. Dynan erbjuder samma fördelar som den med rak botten och utesluter behovet av träskiva för att utjämna sittytan.

- Låg vikt - ca. 1,5 kg
- Mycket stabil
- Unikt ventilationssystem
- Tvättbar i maskin, torktumlas
- Erbjuder optimal tryckutjämning
- Finns med rundad botten för hängmattesits
- Max brukarvikt 130 kg

StimuLITE Classic Sittdynor			
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm			
Rundad botten +S (CL1414S)			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
CL1414	36x36cm	CL1716	43x41cm
CL1416	36x41cm	CL1717	43x43cm
CL1418	36x46cm	CL1718	43x46cm
CL1420	36x51cm	CL1720	43x51cm
CL1516	38x41cm	CL1816	46x41cm
CL1517	38x43cm	CL1817	46x43cm
CL1518	38x46cm	CL1818	46x46cm
CL1520	38x51cm	CL1820	46x51cm
CL1616	41x41cm	CL2016	51x41cm
CL1617	41x43cm	CL2018	51x46cm
CL1618	41x46cm	CL2020	51x51cm
CL1620	41x51cm		


Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för rullstolar med hängmattesits mer än 2,5 cm.

Max storlekar:
CL2422 plan botten (61x56cm)
CL2020S rund botten (51x51cm)

Överdrag:
Cordura: COVCL + storlek
Ullfrotté: WCOVCL + storlek
Glidöverdrag: COVOUTCL + storlek

StimuLITE Inkontinensinlägg	
Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

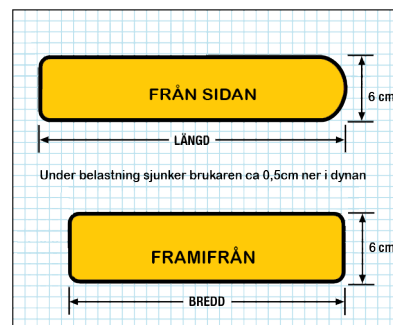

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se