

# KORTINFORMATION

Stimulite® sittdynor är avsedda för att användas i rullstol. Sittdynan är avsedd att användas med överdraget på men det är också möjligt att sitta på den utan överdrag. Dynan skall avemballeras innan den tas i bruk. Lägg den i stolen med dragkedjan bakåt och kardborren nedåt sitsduken.

Tvätt/Rengöring



Max 30 min

Kallt



*Kardborre och greppring 1*

*Tvättråden skall vara bakåt i stolen 1*



*Inkontinensskydd om det är beställt 1*

*Nätet ger luft cirkulationsmöjlighet 1*

Sätt dig bekvämt, tänk på att använda byxor utan stora fickor eller annat som kan ge tryck på sittytan.

## Max brukarvikt

Barndynor (PD, PDCD)	Max 50 kg
Vuxendynor	40 - 130 kg
Classic Bariatric	120 - 360 kg

StimuLITE® sittdynor innehåller 100% Termoplastisk polyuretan, inga andra tillsatser. Den är inte allergiframkallande.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB  
Bultgatan 17  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: 031-52 18 95, Fax: 031-52 18 92  
goran@rehabshop.com  
www.rehabshop.se