

# Användnings- och bruksanvisning Stimulite® barnmadrass

## Användningsområde

Stimulite® barnmadrass är tillverkade för att förebygga och behandla trycksår. Den håller barnet svalt genom sin luftighet. 90 % av madrassen är "open space" och 10% är material i bärande sexkantceller. Ger en bra andningsmiljö då man kan andas genom madrassen vid magläge. Madrassen är inte allergiframkallande och antibakteriell genom sitt material 100% TPU.

## Bruksanvisning

Din Stimulite barnmadrass kommer i ett stycke. Tag av emballaget välj önskat överdrag och lägg därefter madrassen ovanpå underlaget. Cellerna i madrassen skall ha den öppna sidan upp.

## Användningsinstruktion

Stimulite barnmadrass kan användas som enda madrass, men det går också bra att lägga den på annan madrass om så önskas.

För bästa behandlingseffekt. Använd enbart ett löst spänt lakan över madrasskärnan. För att skydda undermadrassen mot kroppsvätskor etc. kan man använda vår fuktuppsamlare (INMATT3227) som då placeras under madrassen. Har man inkontinens finns ett inkontinensöverdrag som andas men ändå står emot väta (COVIN15,5x32, 2448, 2752 och 2856) Olika storlekar för olika madrasskärnor.

Har man behov av ytterligare komfort, exempelvis öm hud, finns ett överdrag i bomull (COVBASSINET, COVCRIB2448, COVCRIB2752 och COVCRIB2856). Det släpper igenom luft och ger extra komfort till ömma kroppsdelar.

## Tvättinstruktioner/Rekonditionering

Tag madrasskärna ut ur överdraget. Är madrasskärnan dammig går det bra att dammsuga eller blåsa rent med trycklyft. När man sedan

tvättar i tvättmaskin, vände eller rulla madrassen så att de öppna cellerna kommer ut mot trumman. Har Du tvättpåse skyddar det madrasskärnan, men det går bra att tvätta även utan tvättpåse. Använd tvättmedel utan blekmedel, och tvätta madrassen ensam i tvättmaskin. Är madrassen lätt smutsad tvätta i 40°. Vid hård smutsning tål madrassen 70 grader i 30 minuter. Madrassen kan även tvättas i badkaret duschas eller tvättas med slang. Låt madrasskärnan lufttorka. Behöver Du torka madrasskärnan snabbt använd handdukar, hårtork, element eller torktumlare, ca 30 minuter (max värme 70°).

Madrasskärnan tål desinfektion typ virkon.. Spruta det då på madrasskärnan alternativt lägg hela madrasskärnan i ett kar 10 minuter med utspädd lösning. Spola efter med vatten.

Inkontinensöverdragen (COVIN) kan tvättas i vanlig maskin 95 grader och torktumlas. Använd mild tvättmedel utan blekmedel. Tål autoklav.

Inkontinensöverdraget kan även torkas av med ytdesinfektion utan sprit.

Fuktuppsamlaren (INMATT3227) kan tvättas i vanlig maskin 95 grader och torktumlas. Använd mild tvättmedel utan blekmedel.

## Brand

Överdragen uppfyller EN 533:1997index 1/5 x75. Kärnan i madrasserna är behandlade för att inte brinna med öppen låga. Samtliga Stimulite produkter är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16.

## Garanti

Alla Stimulite madrasskärnor är CE-märkta och har 3 (tre) års garanti. Garantin inkluderar skador som beror på tillverkning eller materialfel. Garantin täcker inte onormalt handhavande och förslitningsskador, eller skador som uppstått i samband med tvätt eller torkning då tvättråd inte följts.

# Användnings- och bruksanvisning Stimulite® barnmadrass

## Teknisk data

Barnmadrass:100% Termoplastisk polyuretanTPU

Artikel	Artikelnummer	Vikt/densitet	Storlek	Material
Barnmadrass	BASSINET	1,4 kg/ca 85 kg/m <sup>3</sup>	39x81x5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	CRIB2448	2,6 kg/ca 85 kg/m <sup>3</sup>	61x122x5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	CRIB2752	3,05 kg/ca 85 kg/m <sup>3</sup>	69x132x5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	CRIB2856	3,4 kg/ca 85 kg/m <sup>3</sup>	71x142x5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
Inkontinensöverdrag	COVINBASSINET		Passar BASSINET madrass	58% Polyuretan, 42% Polyester
	COVIN2448		Passar madrass CRIB2448	58% Polyuretan, 42% Polyester
	COVIN2752		Passar madrass CRIB2752	58% Polyuretan, 42% Polyester
	COVIN2856		Passar madrass CRIB2856	58% Polyuretan, 42% Polyester
Fuktuppsamlare (sängskydd)	INMATT3227)		passar alla Rehabshops madrasskärnor.	68% Polyester, 30% bomull, 2% Polyolefin
Mjukt bomullsöverdrag	COVBASSINET		Passar madrass BASSINET	100% Ekologisk Bomull
	COVCRIB2448		Passar madrass CRIB2448	Polyester och Bomull sk. pollycotton
	COVCRIB2752		Passar madrass CRIB2752	Polyester och Bomull sk. pollycotton
	COVCRIB2856		Polyesteroch Bomull sk pollycotton	Polyester och Bomull sk. pollycotton
Väska att bära madrass	BAG		passar alla Rehabshops madrasskärnor	52 % Akryl, 42% Bomull och 6 % Polyester
Tvättpåse för madrasskärna	LDBAGBED		passar alla Rehabshops madrasskärnor)	

Om Du upplever olägenheter med Din madrass, avbryt användningen och kontakta Din läkare eller terapeut.

*Lycka till med Din StimuLITE produkt!*

Göran Sjädens Rehab Distribution AB  
Bultgatan 17  
442 40 KUNGÄLV  
Tel 031-521895  
[www.rehabshop.se](http://www.rehabshop.se), [goran@rehabshop.com](mailto:goran@rehabshop.com)

2(2) 2018-06-20

