

Produkt- och bruksanvisning Cirkulationstränaren Trampa



Cirkulationstränaren Trampa är ett lätt robust verktyg för att öka rörlighet och blodcirkulation i ben eller armar.

Kan användas stående på ett bord för aktivering/rörelse träning av armar eller på golvet för aktivering/rörelseträning av ben. Trampa försedd med ett steglöst motstånd som lätt går att reglera med en liten ratt mitt uppe på trampan. Pedalerna är försedda med ett band som går att reglera i tre steg för att hålla foten på plats. Benen är vikbara och tar därför inte mycket utrymme. Den är portabel och kan enkelt förvaras under en stol eller en säng. Benen fälls lätt ut och låses automatiskt och fälls ihop igen genom att trycka in låsknappen på ovansidan av benet där efter viker man benet inåt.

Monteringsanvisning: Tag ur trampan ur förpackningen och avlägsna plasten. Vik ut benen som låser sig automatiskt. Skruva i reglerings ratten i hålet mitt uppe på trampan. Ställ in motståndet och börja trampa. Trampan kan även fästas med ett band för att undvika att den glider mot underlaget.

Begränsningar: Endast avsedd för rörelse/aktivitetsträning av armar eller ben. Belasta inte trampan med mer en 100 kg.

Rekonditionering/Underhåll: Kan rengöras med desinfektionsmedel. Lagret oljas vid behov med symaskinsolja eller dylikt.

Artnr:	27202
Höjd:	29 cm
Bredd:	39 cm
Längd:	45 cm
Vikt:	2 kg
Maxbelastning:	100 kg

Importör: **Mobilex A/S**
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

Göran Sjödén's Rehab Distribution AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV.
+4631- 52 18 95, order@rehabshop.com
www.rehabshop.com

Göran Sjödén's
REHABSHOP
DISTRIBUTION
Uppdaterad: 2018-06-01

Importör: **Mobilex A/S**
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg

Göran Sjödén's Rehab Distribution AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV.
+4631- 52 18 95, order@rehabshop.com
www.rehabshop.com

